

soreFix®

Πείτε αντίο στον έρπη,
χαμογελάστε ελεύθερα



Duo Patch

Επίθεμα επιχείλιου έρπητα με 0.5% υαλουρονικό οξύ

- Βοηθάει στην επούλωση και ανακουφίζει από τον κνησμό
- Μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης
- Διαφανές, υποαλλεργικό, ανθεκτικό στο μακιγιάζ
- Δρα για 12 ώρες

Το SoreFix Duo Patch είναι ένα εξαιρετικά λεπτό, διαφανές, υποαλλεργικό επίθεμα που προσκολλάται στα χείλη. Το επίθεμα περιέχει υαλουρονικό οξύ, το οποίο ενυδατώνει επαρκώς τον επιχείλιο έρπη. Αυτό βοηθάει στην επούλωση του επιχείλιου έρπητα, ανακουφίζει από τον κνησμό, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ ενάντια στις εξωτερικές επιδράσεις, μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης και αποτρέπει τη δημιουργία ουλών. Το επίθεμα δρα αποτελεσματικά για περίπου 12 ώρες, είναι διακριτικό και μπορεί να εφαρμοστεί μακιγιάζ πάνω από αυτό.

Τι είναι ο επιχείλιος έρπης;

Ο επιχείλιος έρπης είναι μία μόλυνση που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή φουσκάλας (φλύκταινας) πάνω στο χείλος. Αυτές οι φουσκάλες (φλύκταινες) περιέχουν υγρό και αποτελούν τον επιχείλιο έρπη.

Ποια είναι τα συμπτώματα της μόλυνσης από επιχείλιο έρπη;

Τα πρώτα συμπτώματα είναι η αίσθηση καύσου και μουδιάσματος στα χείλη και η ερυθρότητα. Οι φουσκάλες που περιέχουν υγρό σχηματίζονται μέσα σε λίγες ώρες. Ο επιχείλιος έρπης προκαλείται από ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, την έμμηνου ρύση, το άγχος, την έκθεση σε έντονο ηλιακό φως, ή την αντίδραση σε ορισμένες τροφές. Ο επιχείλιος έρπης μπορεί πάντα να επανεμφανιστεί, καθώς ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα μορφή και μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω.

Τι να αποφεύγετε όταν έχετε επιχείλιο έρπη;

Εάν έχετε επιχείλιο έρπη, αποφύγετε την επαφή με τα χείλη με άλλα άτομα μέχρι οι φουσκάλες (φλύκταινες) να εξαφανιστούν τελείως. Ο επιχείλιος έρπης είναι εξαιρετικά μεταδοτικός! Αποφύγετε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα φαγητά, καθώς αυτά μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Πώς δρα το SoreFix Duo Patch;

Η μαλακή πλευρά του επιθέματος καλύπτεται με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο επίστρωμα, στο οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα το υαλουρονικό οξύ. Το υαλουρονικό οξύ έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας κάτω από το επίθεμα ένα ενυδατωμένο περιβάλλον, που βοηθάει στην επούλωση της πληγής για 12 ώρες και ανακουφίζει από τον κνησμό. Το επίθεμα δημιουργεί παράλληλα ένα προστατευτικό φιλμ στην επιδερμίδα έναντι εξωτερικών επιδράσεων, ενώ μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσης και προστατεύει το δέρμα από το σχηματισμό ουλών.



Χρήση (βλ. εικόνες):

Πλύνετε τα χέρια προτού να χρησιμοποιήσετε το επίθεμα και σιγουρευτείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και στεγνό. Ανοίξτε τη συσκευασία **1**, πιάστε το απλικατέρ από την ανάποδη πλευρά του επιθέματος μεταξύ αντίχειρα και δείκτη **2** και μετά βγάλτε από τη συσκευασία το απλικατέρ και το επίθεμα **3**. Τοποθετείστε πρώτα το μισό μέρος του επιθέματος στην περιοχή του επιχείλιου έρπητα **4** και στη συνέχεια με το άλλο μισό μέρος καλύψτε όλη την περιοχή **5**. Εάν είναι αναγκαίο, το μακιγιάζ και το κραγιόν μπορούν να εφαρμόζονται πάνω από το επίθεμα. Επαναλάβετε τη θεραπεία, μέχρι ο επιχείλιος έρπης να εξαφανιστεί πλήρως. Μόνο για μια χρήση.



Προειδοποίηση:

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, αναφερθείτε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

Περιέχει: 15 ενεργά επιθέματα

Τα προϊόντα SoreFix αντιμετωπίζουν τον επιχείλιο έρπη και τα στοματικά έλκη και βοηθούν στην πρόληψη των εξάρσεων του επιχείλιου έρπητα. Πείτε αντί στον έρπη, χαμογελάστε ελεύθερα.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.sorefix.com



Διανομέας στην Ελλάδα:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε.

Άγγελου Σικελιανού 61, 14564 Κηφισιά

+30 210 62 08 372

contact@pharmaservehellas.gr



Eurosirel SpA
Viale Europa, 30
Cusago 20047
Milano – Italië



L214GR100